

Inhibitor Forte

Preparat przeznaczony do zahamowania procesów korozji oraz odkładania się kamienia wodnego w autoklawach

Inhibitor Forte jest przeznaczony do wszelkiego typu urządzeń sterylizacyjnych.

ZASTOSOWANIE:

- Przeznaczony jest do zabezpieczenia przed korozją oraz powstawaniem osadów
- Inhibitor Forte jest szczególnie polecany do zabezpieczania puszek podczas sterylizacji.

WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE:

Wygląd:	Bursztynowy do ciemnobrązowego
gęstość w temp. 20°C:	1,15 – 1,17 g/cm ³
pH 1% r-ru	około 10 - 11

SPOSÓB UŻYCIA:

- przygotować roztwór roboczy dodając odpowiednią ilość preparatu Inhibitor Forte do wody pitnej.
- koncentrat, roztwór roboczy dozować za pomocą układów dozujących

STĘŻENIA:

- Od 50-300 ppm

BEZPIECZEŃSTWO:

Może powodować korozję metali. Działa drażniąco na skórę. Może powodować reakcję alergiczną skóry. Działa drażniąco na oczy. Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu. Stosować rękawice ochronne i ochronę oczu/twarzy.

W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKORĄ: Umyć dużą ilością wody. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. Przechowywać pod zamknięciem. Zawartość/Pojemnik zwracać do producenta.

Pozostałe informacje dotyczące klasyfikacji, oznaczania oraz bezpiecznego obchodzenia się z mieszaniną zawarte są w karcie charakterystyki preparatu

PRODUCENT – PODMIOT ODPOWIEDZIALNY

InvestaChem
Łowicz Wałecki 56, 78-650 Mirosławiec

Tel. biuro@investachem.pl www.investachem.pl